

CitoSpray

oldat kenetek fixálására



Leírás

A helyes citológiai diagnózis felállításának előfeltétele a tökéletes mintarögzítés. A frissen levett mintát közvetlenül a levétel után egy optimális összetételű rögzítőszerral kell kezelni. Az azonnali rögzítés megóvja a mintát a kiszáradástól, a sejtek morfológiájának elváltozásaitól, továbbá lehetővé teszi a tiszta festést és ezzel elősegíti a helyes diagnózis felállítását. Amennyiben a rögzítésre az ajánlottnál később került sor, úgy a Papanicolaou módszerrel festett citológiai mintában barnás színű, szemcsés struktúrák képződhetnek.

CitoSpray – katalógus # CS-100 (100 ml, 250 minta fixálására) oldat citológiai kenet rögzítésére pumpás üvegben. Alkohol és polyglycolok optimális arányú keveréke.

CitoSpray solution – katalógus # CS-1L (1000 ml) oldat citológiai kenet rögzítésére üvegben, CitoSpray pumpás kiszerelés utántöltésére.

Citológiai kenet előkészítése festéshez

A frissen levett citológiai kenetet azonnal rögzítse a CitoSpray-vel. Egyenletesen permetezzen háromszor a még nedves kenetre 20 cm távolságról, így megóvja a mintát a későbbi kimosódástól, a sejtek elvesztésétől. Az alkohol a CitoSpray-ből elillan, így a polyglycol egy védő réteget képez. A kenet körülbelül 10 perc elmúltával megszárad és festésre kész, de az így fixált minta ebben a formában pár hétig stabilan tárolható is. Festés előtt a mintát mártsuk 95%-os alkohol oldatba 10 percre, mely eltávolítja a polyglycol védőréteget.

Megrendelhető:

Hisztopatológia Kft. (7624 Pécs, Pf.: 58)

E-mail: orders@histopat.hu **Tel.:** 72/516-490 **www.histopat.hu**



BioGnost Ltd.

Medjugorska 59

10040 Zagreb, Croatia

