

# Trimming Blades

CAH-0100-00A, CAH-0200-00A, CAH-0300-00A, CAH-0400-00A

**Egy éles élű lapos műszer, amelyet fogantyúhoz kell rögzíteni (nem tartozék), így készítve kést az emberi szövetek vágására és/vagy szeletelésére egy hisztopatológiai laboratóriumban a későbbi in vitro diagnosztikai vizsgálatok céljából. Tipikusan rozsdamentes acélból készül. Ez egy újrafelhasználható eszköz.**

**Olyan kézi eszköz, amelyre egy pengét (nem tartozék) kell felszerelni és rögzíteni, így készítve kést az emberi szövetek kézi vágására és/vagy szeletelésére egy hisztopatológiai laboratóriumban a későbbi in vitro diagnosztikai vizsgálatok céljából. Tipikusan szintetikus polimerből (pl. műanyag) vagy fából készül. Ez egy újrafelhasználható eszköz.**

Laboratóriumi felhasználás.

Száraz helyen tartandó.

A termék szavatossága normál környezeti feltételek mellett nem jár le.

Figyelem: A termék éles.

## Használati utasítás

1. Csavarja le teljesen a rögzítőcsavart.
2. Óvatosan csúsztassa be a pengét felülről, amíg a pengében lévő furat és a penge csavarja össze nem áll. Ezután a csavart kézzel kell meghúzni.
3. Az összeszerelés befejeződött.

MEGJEGYZÉS: NE ÉLEZZE MEG.

MEGJEGYZÉS: Az újrafelhasználás előtt gondoskodjon a termék megfelelő tisztításáról.

Ártalmatlanítás: Az ártalmatlanítást a kormányzati előírásokkal összhangban végezze.

MEGJEGYZÉS: A HASZNÁLT PENGÉKET AZ ADAGOLÓ ALJÁBAN LEHET ÁRTALMATLANÍTANI.

**Minden panaszt vagy mellékhatast azonnal jelenteni kell a CellPath vállalatnak.**